



Für jeden Tag und jeden Moment:

JOBST® Pflege- und Serviceprodukte



JOBST® Ratgeber
Pflege & Service

Pflege und Service - Unser Angebot für Sie

Liebe Patientin, lieber Patient!

Sie haben eine Venenerkrankung oder eine Störung Ihres Lymphsystems und tragen deshalb Kompressionsversorgungen? Dann wissen Sie, dass die Pflege und Versorgung Ihrer Haut unverzichtbar ist. Damit Sie ein bestmögliches Therapieergebnis erzielen, ist es wichtig, die Kompressionsversorgung regelmäßig zu tragen. Ein sorgsamer Umgang damit und die richtige Wahl von Hautpflegeprodukten, Zubehör oder An- und Ausziehhilfen spielen bei der Therapie eine wichtige Rolle.

Hautpflege auf hohem Niveau: **JOBST® SkinPro**

Unsere Hautpflegeserie **JOBST SkinPro** eignet sich ideal für die Pflege Ihrer durch die Kompressionstherapie strapazierten Haut. Sie schützt Ihre Haut, erfrischt sie, hält sie schön weich und geschmeidig - für ein angenehmes Hautgefühl, rund um die Uhr.

An- und Ausziehen der Kompressionsversorgung

Um Ihnen das An- und Ausziehen Ihrer Versorgung so einfach wie möglich zu gestalten, gibt es eine Reihe von speziellen Hilfsprodukten in unserem Sortiment. Bitte beachten Sie, dass äußere Einflüsse wie scharfkantige Ringe, Fußnägel oder raue, rissige Haut Kompressionsstrümpfe beschädigen können. Zum Schutz Ihrer Versorgung verwenden Sie Handschuhe, wie z.B. die hochwertigen **JOBST-Griphandschuhe**. Sie haben eine griffige Handschuhinnenfläche, wodurch Sie Ihre Versorgung optimal fassen und bequem an Arm oder Bein anlegen und verteilen

können. Weitere Unterstützung bieten Ihnen die praktischen **An- und Ausziehhilfen von Arion.**

Optimale Pflege Ihrer Kompressionsversorgung

Nach Möglichkeit sollten Kompressionsversorgungen täglich, bzw. mindestens jeden zweiten Tag, im **JOBST Wäschenetz** gewaschen werden. Bei allen Wäschen Ihrer Kompressionsversorgung empfehlen wir Ihnen unser Spezialwaschmittel **JOBST WashCare:**

Verlängern Sie durch eine sorgfältige Pflege die Lebensdauer Ihrer Kompressionsversorgung!

Nutzen Sie die vielen Vorteile, die Ihnen die JOBST Pflege- und Serviceprodukte täglich aufs Neue bieten.

Ihr Fachhändler freut sich darauf, Ihnen unser Angebot detailliert vorzustellen und berät Sie gerne.

Verwöhnen Sie Ihren Körper mit **JOBST® SkinPro** Fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut

Unsere Haut ist das größte Organ unseres Körpers und schützt uns vor Umwelteinflüssen wie zum Beispiel Kälte oder Hitze.

Jede Kompressionstherapie bedeutet eine zusätzliche Herausforderung für unsere Haut, denn auch wenn unsere atmungsaktiven Qualitäten den Tragekomfort in den letzten Jahren deutlich verbessert haben und zugleich die Hautbelastung verringern, kann eine Kompressionsversorgung das natürliche Gleichgewicht der Haut beeinflussen.

Selbstverständlich ist die einzigartige JOBST-Rezeptur zudem mit Ihrer Kompressionsversorgung kompatibel. Das haben umfangreiche Labortests bestätigt!

Um den natürlichen Schutzmantel der Haut zu erhalten, empfehlen wir unsere Pflegeserie **JOBST SkinPro** - damit Sie je nach Bedarf Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgen, erfrischen oder intensiv pflegen können:

- **JOBST® SkinPro Body Lotion** - mit den glättenden und nährenden Eigenschaften von Olivenöl
- **JOBST® SkinPro Body Gel** - mit den erfrischenden Eigenschaften von Menthol
- **JOBST® SkinPro Foot Cream** - mit den pflegenden Eigenschaften von Aloe Vera

Entdecken Sie die JOBST® SkinPro Pflegeserie.



Ihre Kompressionsversorgung

Der richtige Umgang

Das JOBST-Sortiment umfasst hochwirksame Kompressionsversorgungen zur gezielten Behandlung venöser oder lymphatischer Erkrankungen. Eine gute Pflege Ihrer Versorgung ist dabei fast ebenso wichtig wie der perfekte Sitz. Damit Sie sich über Therapieerfolge freuen können, geben wir Ihnen ein paar Tipps für den richtigen Umgang mit Ihrer Kompressionsversorgung an die Hand.

Die Grundregeln - für Sie zusammengefasst:

- Tragen Sie beim An- und Ausziehen Ihrer Versorgung Handschuhe, wie z.B. die JOBST GripHandschuhe. Diese verhindern Beschädigungen, die sonst schnell durch Fingernägel oder Schmuck entstehen können.
- Bitte beachten Sie, dass Fußnägel, Hornhaut, aber auch defekte Schuhe Ihre Kompressionsstrümpfe beschädigen können.
- Waschen Sie Ihre Kompressionsversorgung nach Möglichkeit täglich mit milden Waschmittel wie unserem Spezialwaschmittel JOBST WashCare und schützen Sie sie in der Waschmaschine mit dem JOBST Wäschenetz.





JOBST® GripHandschuhe **Zum Schutz Ihrer Versorgung**

Die praktischen **JOBST Griphandschuhe** erleichtern das Anziehen der Kompressionsversorgung.

- Durch die griffige Handschuhinnenfläche kann die Kompressionsversorgung optimal gefasst und bequem am Bein oder Arm verteilt werden. Das Gestrick lässt sich gleichmäßig und mühelos über das Bein oder den Arm verteilen.
- Gleichzeitig verhindern die JOBST GripHandschuhe Beschädigungen durch äußere Einflüsse wie scharfkantige Ringe, Fingernägel oder rissige Haut.

An- und Ausziehhilfen von Arion

Entdecken Sie die Qualitätsprodukte von **Arion**. Sie zeichnen sich durch eine einfache und bequeme Handhabung aus. Möglich wird dies u. a. durch das gleitfähige Material und die innovative, magnetische Schließung der Produkte. Ob für Arm- oder Beinversorgungen, Arion-Produkte sind auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und erleichtern Ihnen das An- und Ausziehen Ihrer Kompressionsversorgung.



Arion Easy-Slide

Arion Easy-Slide ist eine Anziehhilfe für Kompressionsversorgungen mit offener Fußspitze. Mit dem Produkt können Sie die Strümpfe einfach und selbstständig anziehen.



Arion Easy-Off

Arion Easy-Off ist eine Ausziehhilfe für Kompressionsversorgungen mit offener und geschlossener Fußspitze. Sie ist besonders robust.



Arion Easy-Slide Kids

An- und Ausziehhilfe für Arm- oder Beinversorgungen von Kindern. Der besonders geringe Reibungswiderstand macht das An- und Ausziehen kinderleicht.



Arion Easy-Slide Arm

Arion Easy-Slide Arm ist eine Anziehhilfe für Armversorgungen. Das glatte Material sorgt für einen ausgesprochen geringen Reibungswiderstand.



Arion Magnide

Arion Magnide ist eine Anziehhilfe für Kompressionsversorgungen mit geschlossener Fußspitze. Sie verfügt über eine magnetische Schließung, die die Handhabung vereinfacht.



Arion Magnide 2in1

Arion Magnide 2in1 ist eine An- und Ausziehhilfe für Kompressionsversorgungen mit geschlossener Fußspitze. Durch den Klettverschluss kann sie leicht fixiert werden.



Arion Sim-Slide

Arion Sim-Slide ist eine An- und Ausziehhilfe für Kompressionsversorgungen mit offener Fußspitze. Eine zweite Materialschicht auf der Innenseite erleichtert die Anwendung.



Arion SlideX*

Arion SlideX ist eine zusätzliche Anwendungshilfe für Pflegekräfte zum An- und Ausziehen von Kompressionsversorgungen mit offener und geschlossener Fußspitze.

* Nur zu verwenden in Kombination mit den Produkten:
Arion Easy-Slide, Arion Sim-Slide, Arion Magnide

JOBST® WashCARE

Zur Pflege Ihrer Versorgung

JOBST WashCARE ist ein pflegendes Waschmittelkonzentrat, das sich hervorragend für die Reinigung Ihrer Kompressionsversorgung eignet.

- Spezielle waschaktive Substanzen und Pflegestoffe reinigen und schützen die hochwertigen Garne Ihrer Versorgung.
- JOBST WashCARE ist hautfreundlich, pH-neutral und verleiht Ihrer Kompressionsversorgung einen angenehm frischen Duft.
- Eine Flasche reicht für ca. 125 Handwäschen.



JOBST® Wäschenetz

Zum Schutz Ihrer Versorgung

Das **JOBST Wäschenetz** bietet Kompressionsversorgungen einen optimalen Pflegeschutz.

- Durch die feinmaschige Netzstruktur wird das hochwertige Kompressionsgestrick beim Waschen vor mechanischen Einflüssen wirksam geschützt.
- Das JOBST Wäschenetz gewährleistet eine besonders schonende und effektive Reinigung, die eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Kompressionsversorgung unterstützt.



Kompressionsversorgung täglich zu tragen, ist der beste Weg zu einem guten Therapieergebnis. Dabei ist es wichtig, dass Sie sie sorgfältig pflegen, so verlängern Sie den therapeutischen Effekt langfristig. Das JOBST® Wäschenetz bietet einen optimalen Pflegeschutz für Ihre Kompressionsversorgung. Es gewährleistet eine besonders schonende und effektive Reinigung, die eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit Ihrer Kompressionsversorgung unterstützt.

JOBST® Pflege- und Serviceprodukte

Für jeden Tag und jeden Moment



Mit freundlicher Empfehlung
überreicht durch:



JOBST®,
an Essity brand

BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
46446 Emmerich am Rhein

www.jobst.de
www.lymphcaredeutschland.de
Tel +49 2822 / 607-100
Fax +49 2822 / 607-199