

JOBST®



Patienteninformation

JOBST® FarrowWrap®

Nehmen Sie Ihre Kompressions- therapie selbst in die Hand

Mit einer chronischen Krankheit zu leben, erfordert die Anpassung der täglichen Routine an neue und teilweise komplexe Bedürfnisse - eine echte Herausforderung. Damit Sie eine aktive Rolle für das Erreichen Ihrer Therapieziele übernehmen können, sind die richtigen Mittel zum Selbst-Management unerlässlich.

In der Therapie lymphatischer und venöser Krankheiten gilt die Kompressionstherapie mit Kompressionsbandagen und -strümpfen als unerlässlich. Allerdings können diese Formen der Therapie für manche Patient*innen nur schwer selbstständig genutzt werden. Für solche Fälle gibt es innovative Lösungen: Medizinische adaptive Kompressionssysteme.





WUSSTEN SIE SCHON



Medizinische adaptive Kompressionssysteme eignen sich besonders in der beginnenden Therapie zur Ödemreduktion. Das innovative Design ermöglicht einfaches An- und Ablegen, sodass Patient*innen oder pflegende Angehörige selbstständig das medizinische adaptive Kompressionssystem kontrollieren oder nachjustieren können.



KOMPRESSIIONSTHERAPIE,

DIE ZU IHNEN PASST

- ✓ **Entwickelt für ein einfaches An- und Ablegen**
- ✓ **Geeignet für das effektive "Ödem-Management"**
- ✓ **Bieten therapeutische Kompressionsstufen**
- ✓ **Können diskret unter der Kleidung getragen werden**

Medizinische adaptive Kompressionssysteme

Mit innovativen
Lösungen zu mehr
Selbstständigkeit.

JOBST FarrowWrap medizinische adaptive Kompressionssysteme bieten eine Alternative zu mehrlagigen Kompressionsverbänden und können auch für Patient*innen geeignet sein, denen das selbstständige Anziehen von Kompressionsstrümpfen schwer fällt.

Das einzigartige Design ermöglicht einfache Anwendung und sogar ein Tragen unter der normalen Kleidung - so lässt sich die Kompressionstherapie ideal in den Alltag integrieren.



EINFACH AN IHRE INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSE ANPASSEN

Medizinische adaptive Kompressionssysteme wurden so entwickelt, dass sie eine therapeutisch notwendige Kompression bieten, vergleichbar mit der von Kurzzugverbänden. Sie erlauben dabei allerdings eine höhere Flexibilität, ein selbstständiges An- und Ablegen oder ein einfaches Nachjustieren.



FÜR WELCHE PATIENT*INNEN

EIGNET SICH JOBST FARROWWRAP?

MEDIZINISCHE ADAPTIVE KOMPRESSONSSYSTEME BIETEN EINE FLEXIBLE ALTERNATIVE ZUR THERAPIE MIT KOMPRESSIONSBINDEN ODER -STRÜMPFEN FÜR PATIENT*INNEN MIT...

- ✓ **Lymphödemen** (initiale Entstauungstherapie)
- ✓ **Ödemen bei chronisch venöser Insuffizienz, Phlebödemen** (initiale Entstauungstherapie)
- ✓ **Unterschenkelgeschwüren** (Ulcus cruris venosum)
- ✓ **Verändernden Ödemumfänge**

DIE TECHNOLOGIE HINTER MEDIZINISCHEN

ADAPTIVEN KOMPRESSIONSSYSTEMEN

Die **Kurzzug-Technologie bezieht** sich auf den Druck, den ein medizinisches adaptives Kompressionssystem auf die Extremitäten hat. Bei Aktivität und Bewegung bietet der Stoff einen **hohen Arbeitsdruck** und hilft, den Blutrückfluss und den Abtransport der Lymphflüssigkeit zu fördern. Bei geringer Aktivität und Ruhephasen stellt der **niedrige Ruhedruck** sicher, dass das medizinische adaptive Kompressionssystem komfortabel und sicher anliegt.

**IHRE
ÄRZT*IN ODER
THERAPEUT*IN
BERÄT SIE, OB
JOBST FARROWWRAP
FÜR SIE GEEIGNET
IST.**



VORTEILE

Leicht anzulegen

Dank Klettverschluss leicht an- und abzulegen



Kurzzug-Technologie

Die Kurzzug-Technologie ermöglicht einen niedrigen Ruhe- und hohen Arbeitsdruck, um den lymphatischen und venösen Rückfluss zu verbessern.



JOBST FarrowWrap -

Kompression die sich Ihrem Lebensstil anpasst

Der **JOBST FarrowWrap** ermöglicht Ihnen eine **selbstständigere und auf Ihre Bedürfnisse angepasste Therapie von Ödemen**.

Das medizinische adaptive Kompressionssystem be-

steht aus strapazierfähigen Materialien und hilft aktiv venöse und lymphatische Ödeme zu reduzieren und die Heilung venöser Beinulzera zu fördern.

SELBSTSTÄNDIGES AN- UND ABLEGEN

JOBST FarrowWrap wurde zur einfachen Anwendung entwickelt und hat sämtliche Vorteile mehrlagiger Kompressionsverbände - ganz ohne das langwierige und umständliche Anlegen.

Die verstellbaren Klettverschlüsse erlauben Ihnen schnell, sicher und selbstständig die Nachjustierung der einzelnen Bänder bei Bedarf und verhindern somit einen Druckverlust der Versorgung. Dies führt zu einer wirksamen Förderung der Ödemrückbildung.

INTUITIVE ANWENDUNG



Anpassbar

Das Klettverschlussystem ermöglicht Ihnen, ein eigenständiges Nachjustieren der Bänder, um einen Druckverlust der Versorgung zu verhindern.

Kompakt

Das kompakte Design trägt weniger auf als mehrlagige Verbände und kann unter normaler Kleidung getragen werden.



JOBST FarrowWrap

Selbstständigkeit mit Kompression

Die JOBST FarrowWrap-Produktreihe leicht anwendbarer medizinischer adaptiver Kompressionssysteme unterstützt Sie bei dem eigenständigen Management von Ödemen und verleiht Ihnen täglich mehr Selbstvertrauen und Selbstständigkeit.

Das strapazierfähige Material von JOBST FarrowWrap bietet die gleiche, starke Unterstützung wie mehrlagige Kompressionsverbände, allerdings mit einem einfacheren, intuitiven Design. Es hilft dabei, venöse und lymphatische Ödeme zu reduzieren und die Heilung venöser Beinulzera zu fördern.



JOBST FARROWWRAP

UNTERE EXTREMITÄTEN¹

Abhängig vom Grad und der Position der Ödeme bietet das JOBST FarrowWrap-Sortiment eine Auswahl zweier Kompressionsstärken und verschiedener Längentypen:

JOBST FarrowWrap LITE

(20-30 mmHg) und

JOBST FarrowWrap STRONG

(30-40 mmHg).

Anpassbar für jedes Bedürfnis

JOBST FarrowWrap ist in verschiedenen Längentypen und Kompressionsklassen erhältlich. Kontaktieren Sie Ihre Ärzt*in oder Therapeut*in, um Ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen zu besprechen.



JOBST FARROWWRAP

OBERE EXTREMITÄTEN²

Für die Therapie von Ödemen der Arme ist der **JOBST FarrowWrap LITE** (20-30 mmHg) als Arm- und Handteil erhältlich. Das Armteil besitzt einen integrierten Unterziehstrumpf, um das Anlegen zu erleichtern.

85 %
DER PATIENTEN*INNEN




Eine Beobachtungsstudie über die Wirksamkeit und Sicherheit von JOBST FarrowWrap ergab, dass 85% der Patienten*innen die medizinischen adaptiven Kompressionssysteme einfach nach Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen konnten.

73% der Patienten*innen gaben eine positive Bewertung zur Anwendbarkeit von JOBST FarrowWrap. So kann JOBST FarrowWrap bei der Behandlung venöser und lymphatischer Indikationen eine geeignete Wahl sein.³

¹ Es wird empfohlen, JOBST FarrowWrap Fußteil in Verbindung mit JOBST FarrowWrap Beinversorgung einzusetzen

² Es wird empfohlen, JOBST FarrowWrap Handteil in Verbindung mit JOBST FarrowWrap Armteil einzusetzen.

³ Beobachtungsstudie JOBST FarrowWrap 2019, interne Daten.

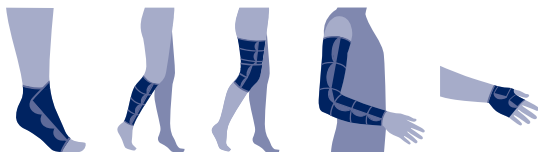


Tipps für die Kompressionstherapie



TRAGEN SIE


GEEIGNETES SCHUHWERK



Festes Schuhwerk ist wichtig, um das Risiko von Stürzen zu vermeiden und JOBST FarrowWrap zu schützen. Mit einem flexiblen, komfortablen und gutaussehenden Schuh lässt sich auch ein medizinisches adaptives Kompressionssystem angenehm tragen.

WASCHEN SIE

IHREN VERBAND



Schließen Sie vor dem Waschen die Klettverschlüsse zusammen, um ein Verhaken während des Waschens zu vermeiden. Für eine lange Lebensdauer, beachten Sie unbedingt die mitgelieferten Pflegehinweise.



ACHTEN SIE AUF

IHRE ERNÄHRUNG



Obwohl sich keine spezielle Diät als effektiv in der chronischen Ödembehandlung erwiesen hat, wird eine gesunde und ausbalancierte Ernährung empfohlen. Adipositas kann ein bereits existierendes Lymphödem negativ beeinflussen.

PFLEGEN SIE

IHRE HAUT



Pflegen Sie Ihre Haut mit Feuchtigkeitscremes, da eine trockene oder spröde Haut das Risiko von Infektionen erhöhen kann. Es ist außerdem wichtig, dass betroffene offene Wunden regelmäßig gesäubert werden und geeignet geschützt werden, bevor eine Kompression angelegt wird.



Wir sind
für Sie da..

... JEDERZEIT

Wenn Sie Fragen haben oder mehr darüber wissen wollen, wie JOBST Produkte Sie unterstützen können, besuchen Sie:

www.jobst.de / www.jobst-austria.at

LymphCare ist eine Online-Plattform, die Sie auf dem Weg mit Ihrem Lymphödem oder Lipödem unterstützt. Alles was Sie wissen müssen, finden Sie hier:

www.lymphcare.com

ÜBERREICHT DURCH:



BSN-JOBST GmbH
Beiersdorfstraße 1
46446 Emmerich am Rhein
Deutschland
www.jobst.de
www.jobst-austria.at
www.LymphCare.com

Tel +49 (0) 2822 607-100
Fax +49 (0) 2822 607-199
Tel Int. +49 (0) 2822 607 - 333

 **essity**

JOBST®,
an Essity brand

70320-00035-00